

Sutricon[®]CC

Jedynie na polskim rynku silikonowe plastry z witaminą E na blizny po cesarskim cięciu

BLIZNY STARE I NOWE
AKTYWNE DZIAŁANIE W DZIEŃ I W NOCY
TECHNOLOGIA REKOMENDOWANA PRZEZ EKSPERTÓW

NOWOŚĆ

Wysokiej jakości silikon farmaceutyczny

- ✿ Zmniejszają, rozjaśniają i wygładzają bliznę
- ✿ Niwelują uczucie ciągnięcia i swędzenia blizny
- ✿ Posiadają właściwości zbliżone do zdrowej skóry:
Elastyczność • Przepuszczalność tlenu • Zapobieganie utracie wody

Nr 1¹
na blizny



Minimalny czas terapii to
3 miesiące dla świeżych blizn
i 6 miesięcy dla starszych blizn



Plaster można przyciąć
do wielkości blizny



Możliwość wielokrotnej aplikacji



1 opakowanie zawiera 5 plastrów



Aby w przyszłości blizna po cesarskim cięciu była jak najmniej widoczna, ważna jest jej staranna pielęgnacja. Po całkowitym zagojeniu rany (kiedy zejdą wszystkie strupy i pojawi się nowa tkanka) można zastosować silikonowe plastry Sutricon[®] CC.

Pełna kuracja = min. 3 miesiące

Jak stosować plastry silikonowe na blizny Sutricon[®] CC:

- Plaster należy dociąć do wielkości blizny, zostawiając margines 5 mm z każdej strony i nakleić na bliznę. **1 plaster = 3-5 dni stosowania.** Raz na dobę należy zdjąć plaster, umyć bliznę, osuszyć i nałożyć ponownie ten sam plaster.
- Uwaga! Plastra nie należy myć, ani zaklejać dodatkowym opatrunkiem.

Wyrób medyczny

5 plastrów 5x30 cm, wielkość plastra dostosowana do blizn po cesarskim cięciu

1. Dane IMS Value, IV.2019

KUP W APTECE INTERNETOWEJ



sutricon.pl



Silikon - terapia I rzutu w profilaktyce i leczeniu blizn.¹


PODWÓJNA SIŁA DZIAŁANIA PŁASTRÓW

Silikon + membrana poliuretanowa + witamina E

optymalne środowisko gojenia blizny

- efekt okluzji (wzrost nawilżenia + wymiana gazów)
- podwyższenie temperatury skóry pod plasterm²

bariera przeciw bakteriom i negatywnym bodźcom ze środowiska zewnętrznego

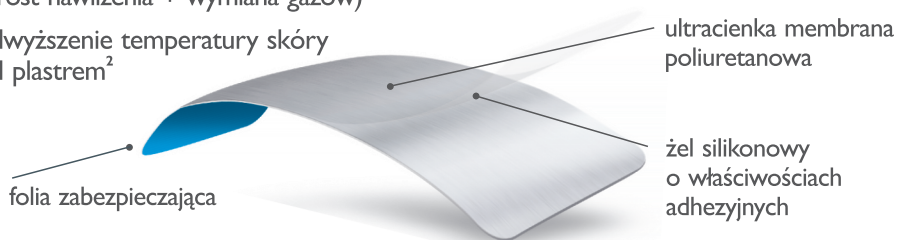

Plastry Sutricon[®] CC zostały dodatkowo wzbogacone o witaminę E, która stymuluje epitelializację oraz pozwala na utrzymanie zdrowego wyglądu skóry. Witamina E pomaga utrzymać właściwe nawilżenie naskórka, dzięki czemu skóra staje się miękka i bardziej elastyczna.

Pod plasterm następuje podwyższenie temperatury o około 1°C, stwarzając odpowiednie warunki do regeneracji i właściwej przebudowy blizny.²

Silikon użyty w plastrach Sutricon[®] CC zapewnia doskonałą adhezyjność (przyczepność) do skóry, dzięki czemu możliwa jest jego wielokrotna aplikacja.

DLACZEGO WARTO STOSOWAĆ PŁASTRY SUTRICON[®] CC?

- ✓ **Efektywne w leczeniu zarówno świeżych, jak i dojrzałych blizn, nawet 9-letnich**
- ✓ **Stosowanie plastrów silikonowych jest rekomendowane przez Międzynarodowy Zespół Ekspertów³**
- ✓ **Są wygodne w stosowaniu – w przeciwieństwie do maści nie brudzą ubrań, nie są tłuste i kleiste**
- ✓ **Są ultracienkie (0,25 mm) oraz przezroczyste, dzięki czemu są prawie niewidoczne na skórze**
- ✓ **Posiadają półprzepuszczalną membranę, dzięki czemu pozwalają oddychać skórze**

1. Updated Scar Management Practical Guidelines: Non-invasive and invasive measures, Monstrey S, Middelkoop E, Vranckx JJ, Bassetto F, Ziegler UE, Meume S, Téot L, Journal of Plastic, Reconstructive & Aesthetic Surgery (2014) 67 1017-1025. 2. Silikonowe preparaty do leczenia powierzchniowego blizn. M. Jamrógliewicz i inni, Terapia i leki, Tom 66, nr 6, 2010. 3. International clinical recommendations on scar management. Muste TA, Cooter RD, Gold MH, Hobbs FD, Ramelet AA, Shake-speare PG, Stella M, Teot L, Wood FM, Ziegler UE; International Advisory Panel on Scar Management. Plast Reconstr Surg. 2002 Aug; 110(2): 560-71.

Sutricon[®]CC



KUP W APTECE INTERNETOWEJ 

sutricon.pl



Silikon - terapia I rzutu w profilaktyce i leczeniu blizn.¹

